

Épilateur thermique DANA

Adapté pour l'épilation indolore, rapide et sûre des mamelles

Avantages produit

- Réglable: noix de réglage permettant d'orienter l'axe du brûleur dans la position souhaitée
- Allumage automatique piezo permettant de déclencher la flamme en un seul clic lorsque le brûleur est parfaitement positionné sous le pis de l'animal
- Absence de tuyau: cartouche de gaz fixée directement au raccord arrière sous la poignée de l'épilateur
- Polyvalent: utilisation aussi bien en salle de traite qu'en stabulation
- Nettoyage facile au jet d'eau



Caractéristiques techniques

- Poids : 850 g (1315 g avec cartouche de gaz)
- Autonomie: environ 1 heure
- Longueur: 120 cm

Références

Épilateur thermique DANA	551307
Cartouche de gaz de recharge 340 g	551308

Conseils d'utilisation

- Positionner l'épilateur à 10/20 cm sous le pis
- L'allumer
- Le déplacer en permanence horizontalement pendant 2 à 4 secondes
- Il est recommandé d'éteindre l'appareil entre chaque vache de manière à ne pas les stresser avec la flamme
- Raser à la première épilation s'il y a trop de poils
- Ne pas épiler juste après la traite, afin d'éviter une irritation avec les produits de trempage
- Il est recommandé d'éteindre l'appareil entre chaque vache de manière à ne pas les stresser avec la flamme

